

パシャットとリーダー タッチ操作一覧

共通

- 情報読み(タップ)
- メニューを開く(ダブルタップの長押し)
- メニューを閉じる(2本指で上にフリック)
- バージョン情報の表示(2本指のダブルタップの長押し)
- パシャットとリーダーの終了(4本指で下にフリック)

メニューの操作

- メニュー項目の移動(上にフリック、下にフリック)
- メニューを閉じる(左にフリック、2本指で上にフリック)
- 項目の決定(ダブルタップ、右にフリック)

カメラモード

- 写真の撮影 通常画質(一時停止している状態で下にフリック)
- 写真の撮影 高画質(ダブルタップ)
- カメラの倍率を上げる(ピンチアウト)
- カメラの倍率を下げる(ピンチイン)
- カメラの倍率を等倍に戻す(2本指で上にフリック)
- カメラ画面の一時停止(長押し)
- ロックモードへ切り替え(一時停止している状態で上にフリック)
- ギャラリーモードへ切り替え(上にフリック)

ロックモード

- 文字の読み上げ(2本指で下にフリック)
- 文字の読み上げ停止(2本指で上にフリック)
- ルーペを表示(ダブルタップ)
- ルーペを閉じる(2本指で上にフリック)

- 写真の拡大(ピンチアウト)
- 写真の縮小(ピンチイン)
- 写真の拡大を終了(2本指で上にフリック)
- カメラモードへ戻る(下にフリック)

ギャラリーモード

- 文字の読み上げ(2本指で下にフリック)
- 文字の読み上げ停止(2本指で上にフリック)
- ルーペを表示(ダブルタップ)
- ルーペを閉じる(2本指で上にフリック)
- 写真の拡大(ピンチアウト)
- 写真の縮小(ピンチイン)
- 写真の拡大を終了(2本指で上にフリック)
- 写真の削除(2本指で右にロングフリック)
- 新しい写真へ移動(下にフリック)
- 古い写真へ移動(上にフリック)
- 1日単位で新しい写真へ移動(3本指で下にフリック)
- 1日単位で古い写真へ移動(3本指で上にフリック)
- もっとも新しい写真へ移動(3本指で下にロングフリック)
- もっとも古い写真へ移動(3本指で上にロングフリック)
- カメラモードへ戻る(最も新しい写真で下にフリック)

ルーペの操作

- ルーペの種類の変更(3本指でタップ)
- ルーペの倍率を上げる(ピンチアウト)
- ルーペの倍率を下げる(ピンチイン)